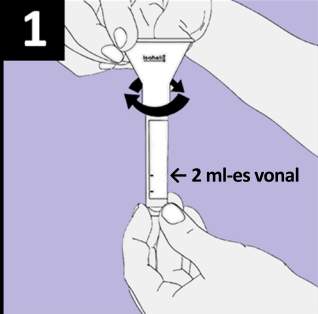
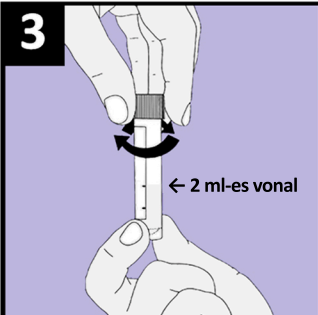
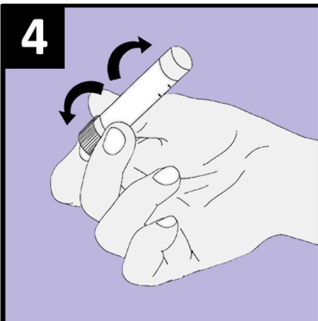


Fogyasszon, igyon, dohányozzon, ne mosson fogat és ne rágjon gumit 30 perccel a használat előtt.
Mielőtt kinyitná, ellenőrizze, hogy a folyadék szintje 1 ml-es jelnél van-e.

1 	1. Távolítsa el a kupakot a csőből. Mentse el a fedelet későbbi használatra. Csavarja le a csövön lévő gyűjtőtölcsért.
2 	2. A tölcsérben a cső folyadékszintjéig köpni, buborékok nélkül elérni a 2 ml-es vonalat. A nyálkibocsátás 2–5 percet vesz igénybe.
3 	3. Csavarja le és helyezze vissza a gyűjtőtölcsért Erősen keverje meg a fedelet. Dobja el a tölcsért.
4 	4. Az eltávolításhoz rázza meg többször a gyűjtőcsövet Keverje össze a nyálát. a megoldással. SZÜRET UTÁN TARTSA A SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉT

Óvintézkedések: Ne nyelje le. Alaposan mossa le vízzel, ha stabilizáló oldat kerül a bőrre vagy a szemre. A csővédelem fulladásveszélyt jelenthet a kisgyermek számára.