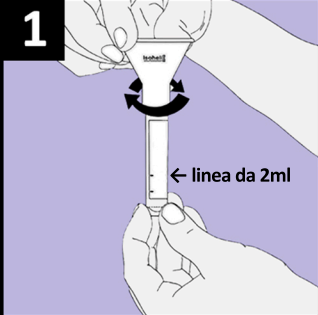
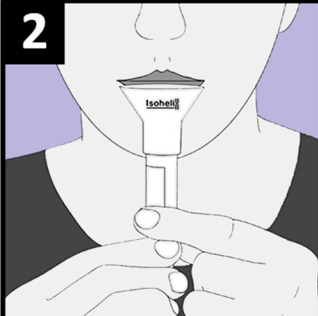
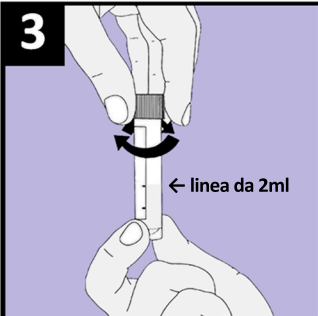
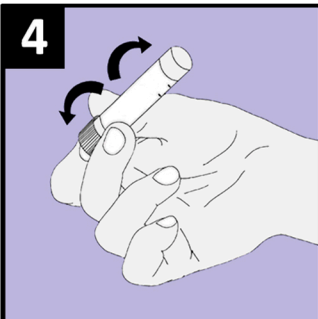


Non mangiare, bere, fumare, lavarsi i denti o masticare gomme per 30 minuti prima dell'uso.
Controllare che il livello del fluido sia alla linea di 1 ml prima dell'apertura.

- | | |
|---|--|
|  | <p>1. Rimuovere il tappo dal tubo.
 Conservare il cappuccio per un uso successivo.
 Avvitare l'imbuto di raccolta sul tubo.</p> |
|  | <p>2. Sputare nell'imbuto fino al livello del liquido nel tubo, escluse le bolle, raggiunge la linea 2ml.</p> <p>La consegna della saliva richiederà tra 2 e 5 minuti.</p> |
|  | <p>3. Svitare l'imbuto di raccolta e sostituire il tappo del tubo strettamente.
 Scartare l'imbuto.</p> |
|  | <p>4. Agitare più volte il tubo di raccolta per mescolare la saliva con la soluzione.</p> <p>CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE DOPO IL RACCOLTO</p> |

Precauzioni: non ingerire. Se la soluzione stabilizzante entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Il tappo della provetta può rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli.