

Coma, beba, fume, escove os dentes ou masque chiclete 30 minutos antes de usar.

Antes de abrir, verifique se o nível do líquido está na marca de 1 ml.




1. Remova a tampa do tubo.
Guarde a capa para uso posterior.
Desaparafuse o funil de coleta do tubo.




2. No funil até o nível do líquido do tubo
cuspir, **atingir a marca de 2 ml sem bolhas.**

A secreção do muco leva de 2 a 5 minutos.

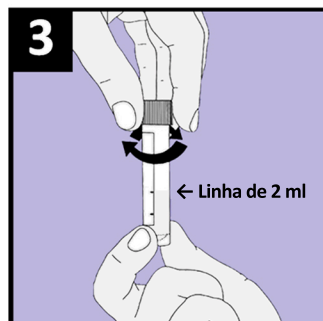

3. Desaparafuse e substitua a tremonha
Agite a tampa vigorosamente.
Descarte o funil.

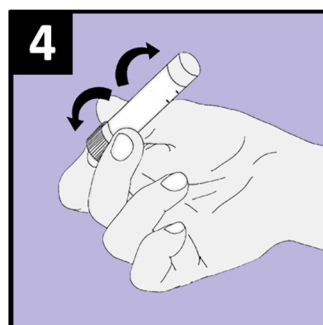

4. Agite o coletor várias vezes para remover
Misture a saliva. com a solução.

MANTER A TEMPERATURA DA SALA APÓS A COLHEITA

Precauções: Não engula. Lavar abundantemente com água se a solução estabilizante entrar em contacto com a pele ou olhos. A proteção do tubo pode representar um risco de asfixia para crianças pequenas.