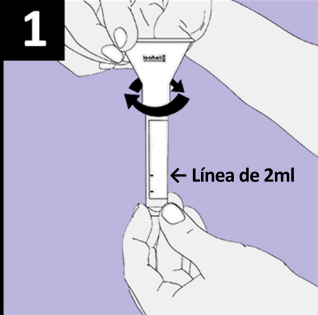
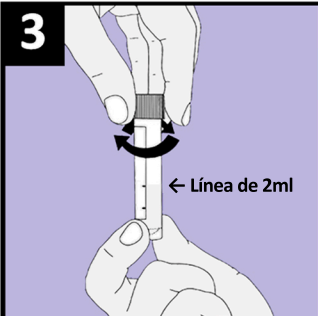


No coma, beba, fume, se cepille los dientes ni mastique chicle durante 30 minutos antes de su uso.
Verifique que el nivel de líquido esté en la línea de 1 ml antes de abrir.

	<p>1. Retire la tapa del tubo. Guarde la tapa para uso posterior. Enrosque el embudo de recogida en el tubo.</p>
	<p>2. Escupir en el embudo hasta el nivel del líquido en el tubo, excluyendo burbujas, alcanza la línea de 2ml.</p> <p>La entrega de saliva tardará entre 2 y 5 minutos.</p>
	<p>3. Desenrosque el embudo de recolección y vuelva a colocar la tapa del tubo. cercanamente. Deseche el embudo.</p>
	<p>4. Agite el tubo colector varias veces para mezclar la saliva con la solución.</p> <p>MANTENER A TEMPERATURA AMBIENTE DESPUÉS DE LA COSECHA</p>

Precauciones: no ingerir. Si la solución estabilizadora entra en contacto con la piel o los ojos, lávese bien con agua. La tapa del tubo puede representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.