



Ät, drick, rök, borsta inte tänderna eller tuggummi 30 minuter före användning.

Se till att vätskenivån ligger vid 1 ml-märket innan du öppnar den.

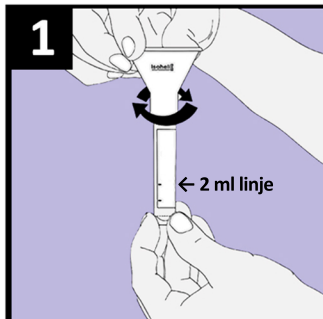


1. Ta bort locket från röret.
Spara locket för senare användning.
Skruva upp insamlingstratten på röret.

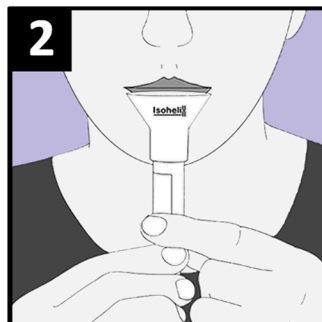


2. I tratten upp till vätskenivån i röret
spotta, **utan bubblor** när den 2 ml-linjen.

Utsläpp av saliv tar mellan 2 och 5 minuter.

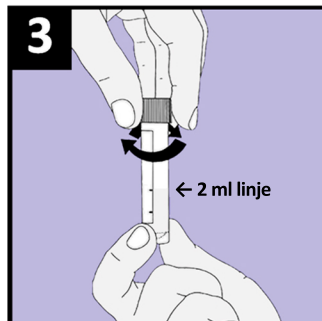

3. Skruva loss och byt ut uppsamlingstratten
Rör locket tätt.
Kasta tratten.

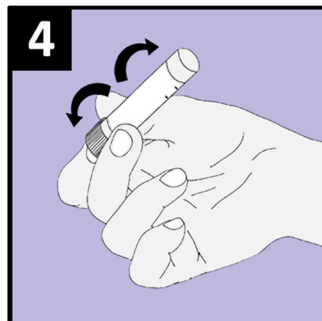

4. Skaka uppsamlingsröret flera gånger för att ta bort
Blanda saliv. med lösningen.

HÅLL RUMSTEMPERATUR EFTER SKÖRD

Försiktighetsåtgärder: Får inte förtäras. Tvätta noggrant med vatten om stabilisatorlösning kommer på huden eller ögonen. Rörskyddet kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.