

Potilasohjeet syljen keräämiseen

REF GFX-02

CE

IVD

Älä syö, juo, tupakoi, harjaa hampaita tai pureskele purukumia 30 minuuttiin ennen käyttöä.


Varotoimet: Älä niele. Jos stabiloivaa liuosta joutuu iholle tai silmiin, pese runsaalla vedellä.

Putken korkki voi aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Käyttöturvallisuustiedote on

saatavilla osoitteessa www.isohelex.com

Sarjan sisältö: Näyteputki, jossa on 2 ml stabilointiliuosta ja suppilo.

GeneFix Saliva Collectors on tarkoitettu ihmisen sylkinäytteiden keräämiseen DNA:n stabilointia varten.

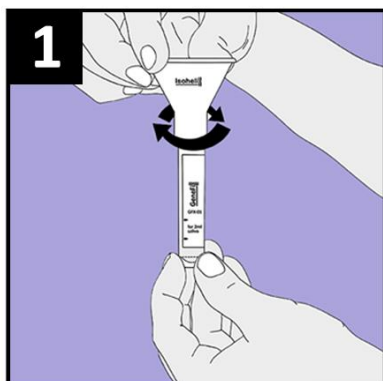


Ennen käyttöä: Poista keräyssuppilo ja putki pakkauksesta.

Tarkista ennen käyttöä, että nesteen taso putkessa on 2ml From → linjalla. Jos liuos on samea, lämmitä putkea varovasti käsissäsi muutaman minuutin ajan.

1. Kierrä letkun korkki irti varoen läikyttämästä nestettä. Säilytä korkki myöhempää käyttöä varten.


Kiinnitä keräyssuppilo varovasti putkeen. Älä kiristä liikaa.

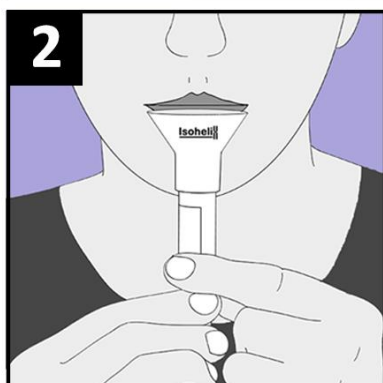


2. Aloita sylkeminen suppiloon. Vinkki: Jos sylki ei virtaa helposti putkeen, ruuvaa suppilo osittain irti.

Jatka sylkemistä suppiloon, kunnes nesteen taso putkessa, ilman kuplia, saavuttaa 4 ml → linjan

Syljenerityksen edistämiseksi voit hieroa posken sisäpuolta kielelläsi tai hieroa varovasti poskien ulkopuolta

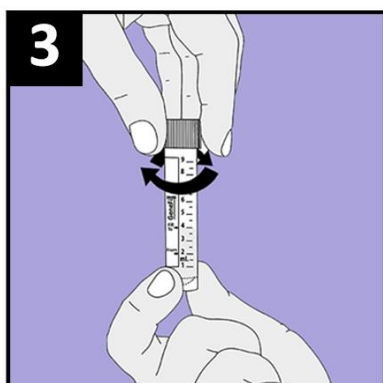

3. Kierrä keräyssuppilo irti ja aseta putken korkki tiukasti paikalleen. Hävitä suppilo.

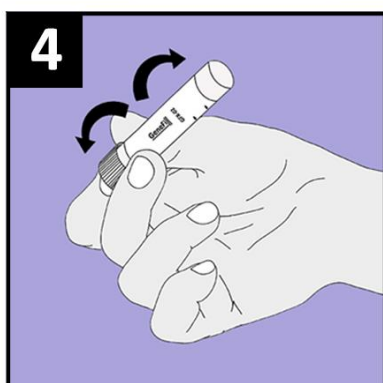

4. Ravista keräysputkea useita kertoja, jotta sylki sekoittuu liuokseen

Laboratoriokäsittelyyn: Proteinaasi K tarvitaan hajoamiseen, .
Lisätietoja on osoitteessa www.isohelex.com